

Arctic 17

Løftestol

HEPRO

NYHET
SYNKRON-
FUNKSJON
Se side 5



Mestring • Trygghet • Trivsel
Se og kjøp våre produkter på hepro.no

Hils på nye Arctic 17

Vi har 30 års erfaring med produkter som gir mestring, trygghet og trivsel til eldre og funksjonsnedsatte, og lanserer den nye Arctic 17 med denne erfaringen som grunnstein. Samtidig satser vi på innovasjon og utvikling og jobber kontinuerlig med forbedring av våre produkter. I tett samarbeid med både terapeuter og brukere, har vi hevet vår velprøvde Arctic 17 til et nytt nivå.

I den nye Arctic 17 har vi utviklet et nytt putesett i 2-lags skum for bedre trykkavlastning og enda bedre sittekomfort. Løftestolen skal passe til alle som har behov for hjelp til oppreisning, og vi har derfor utvidet stolens fleksibilitet med flere bredder enn tidligere. Vi tilbyr også flere justeringsmuligheter og et bredt tilbehørsprogram. Slik kan vi imøtekomme ulike behov, selv når behovet endrer seg underveis. Løftestolen kan enkelt justeres og bygges om fra rettløft til skråløft, dette gjelder alle modeller med unntak av Arctic 17/60.

Vi ønsker at du selv skal mestre din hverdag, og da er det viktig at våre produkter er forståelige og brukervennlige. Vi har derfor forenklet betjeningen på den nye Arctic 17 med kontrastfarger, piktogrammer og tekst som gjør stolens funksjoner godt synlige og enkle å forstå.

Trygghet er noe av det viktigste vi kan tilby deg som bruker av våre produkter. Vi har derfor videreutviklet vår løftemekanisme for å gjøre stolen enda mer robust, stabil og trygg.

Et trygt løft skal hjelpe deg opp og ut av stolen slik at du kan delta i din egen hverdag. Vi anser deltagelse som en av de viktigste faktorene for å oppnå trivsel, men vet også at velvære og komfort er avgjørende. Ved bruk av nyeste skumteknologi kan du sette deg ned med en god kopp kaffe eller bok og oppleve komforten av et skum som gir god avlastning og støtte over lengre tid. For ytterligere komfort anbefaler vi tilt-modellen som trygt tilter tilbake i hvilende posisjon, men også helt tilbake i sjokkleie.

Med USB-lader i stolen vil telefon, nettbrett eller annet velferdsteknologiutstyr være lett tilgjengelig, også under lading.

I hjemmet framstår Arctic som moderne, men samtidig tidløs. Stolen har stramme linjer og sjatteringer i stoffet slik at den framstår som ny selv etter lang tids bruk. Vi har brukt materialene stoff, hud og eik, gjenkjennelig fra møbel - og interiørmarkedet, slik at stolen vil bli en naturlig del av stuen.





Nye Arctic 17 – Løftestolen for alle behov



Alle modellene (untatt 17/60) kan enkelt bygges om fra skråløft til rettløft.

Arctic 17 Sortiment



Standard-modellene har individuell regulering av rygg og fotpute. Stolen leveres med håndkontroll med kontrast-farger for enkel betjening av de ulike funksjonene.

Passer for alle som har behov for en løftestol.



Bruker styrer ryggvinkel/løft og fothviler uavhengig av hverandre med 4 knapper.



Tilt-modellene er de mest avanserte av våre modeller. Stolen kan tiltes helt bak i liggende stilling for optimal avlastning.

Alle våre Tilt-modeller kan tiltes tilbake i sjokkleie.

Passer for deg som tilbringer større deler av dagen i stolen og derfor har behov for variert avlastning og trenger endring i sittestilling for å unngå trykksår.



Bruker styrer ryggvinkel/løft, fothviler og tilt uavhengig av hverandre med 6 knapper. Automatisk løft ved å trykke på øverste venstre knapp.

NYHET SYNKRON-FUNKSJON Fotpute og rygg beveger seg synkront, slik at hoften belastes minst mulig når du endrer stilling. Avlast enkelt bena mens du ser på TV eller leser.

Synkron-modellene har sammenkoblet elektrisk funksjon av rygg og fotpute. Stolene leveres med svært enkel hånd-kontroll med bare to knapper. Passer for deg som trenger den enkleste betjeningen av stolens funksjoner.

Passer spesielt for kognitivt svake brukere.



Fotbrettet løfter (tilt) 23,4 grader. Rygg står i ro.

Rygg går bakover (tilt) 58,4 grader. På denne måten åpner hoftevinkel. Fotbrett beholder stillingen.

Fotbrett løfter til maks. stilling. Ryggen står i ro.

Rygg fortsetter bakover. Nå kan du oppnå maksimal hvilestilling.

Arctic 17 Modeller



17/40

Hud (svart)/Stoff (blå)

Sittebredde	Brukervekt
-------------	------------

40-50 cm < 165 kg



17/45

Hud (svart)/Stoff (blå)

Sittebredde	Brukervekt
-------------	------------

45-55 cm < 165 kg



17/50

Hud (svart)/Stoff (blå)

Sittebredde	Brukervekt
-------------	------------

50-60 cm < 165 kg



17/55

Hud (svart)/Stoff (blå)

Sittebredde	Brukervekt
-------------	------------

55-65 cm < 165 kg



17/60

Hud (svart)/Stoff (blå)

Sittebredde	Brukervekt
-------------	------------

60-70 cm < 166-260 kg

Artikkelnummer og HMS nummer

Art. nr.	HMS-nr.	Sete-bredde	Beskrivelse	Post	Rangering
29410	240503	40 cm	Synkron stoff	1	1
29411	240504	40 cm	Synkron hud	1	1
29414	240505	45 cm	Synkron stoff	1	1
29415	240506	45 cm	Synkron hud	1	1
29418	240507	50 cm	Synkron stoff	1	1
29419	240508	50 cm	Synkron hud	1	1
29422	240509	55 cm	Synkron stoff	1	1
29423	240510	55 cm	Synkron hud	1	1
29412	240511	40 cm	Synkron stoff Sving	2	1
29413	240512	40 cm	Synkron hud Sving	2	1
29416	240513	45 cm	Synkron stoff Sving	2	1
29417	240514	45 cm	Synkron hud Sving	2	1
29420	240515	50 cm	Synkron stoff Sving	2	1
29421	240516	50 cm	Synkron hud Sving	2	1
29424	240517	55 cm	Synkron stoff Sving	2	1
29425	240518	55 cm	Synkron hud Sving	2	1
29428	240519	60 cm	Synkron stoff Sving	3	1
29429	240520	60 cm	Synkron hud Sving	3	1
29430	-	40 cm	Standard stoff	4	-
29431	-	40 cm	Standard hud	4	-
29434	-	45 cm	Standard stoff	4	-
29435	-	45 cm	Standard hud	4	-
29438	-	50 cm	Standard stoff	4	-
29439	-	50 cm	Standard hud	4	-
29442	-	55 cm	Standard stoff	4	-
29443	-	55 cm	Standard hud	4	-
29446	240521	60 cm	Standard stoff	5	1
29447	240522	60 cm	Standard hud	5	1
29450	240523	40 cm	Tilt stoff	6	2

Art. nr.	HMS-nr.	Sete-bredde	Beskrivelse	Post	Rangering
29451	240524	40 cm	Tilt hud	6	2
29454	240525	45 cm	Tilt stoff	6	2
29455	240526	45 cm	Tilt hud	6	2
29458	240527	50 cm	Tilt stoff	6	2
29459	240528	50 cm	Tilt hud	6	2
29462	240529	55 cm	Tilt stoff	6	2
29463	240530	55 cm	Tilt hud	6	2
29466	240531	60 cm	Tilt stoff	7	1
29467	240532	60 cm	Tilt hud	7	1
29432	240533	40 cm	Standard stoff Sving	8	2
29433	240534	40 cm	Standard hud Sving	8	2
29436	240535	45 cm	Standard stoff Sving	8	2
29437	240536	45 cm	Standard hud Sving	8	2
29440	240537	50 cm	Standard stoff Sving	8	2
29441	240538	50 cm	Standard hud Sving	8	2
29444	240539	55 cm	Standard stoff Sving	8	2
29445	240540	55 cm	Standard hud Sving	8	2
29448	240541	60 cm	Standard stoff Sving	9	1
29449	240542	60 cm	Standard hud Sving	9	1
29452	240543	40 cm	Tilt stoff Sving	10	2
29453	240544	40 cm	Tilt hud Sving	10	2
29456	240545	45 cm	Tilt stoff Sving	10	2
29457	240546	45 cm	Tilt hud Sving	10	2
29460	240547	50 cm	Tilt stoff Sving	10	2
29461	240548	50 cm	Tilt hud Sving	10	2
29464	240549	55 cm	Tilt stoff Sving	10	2
29465	240550	55 cm	Tilt hud Sving	10	2
29468	240551	60 cm	Tilt stoff Sving	11	1
29469	240552	60 cm	Tilt hud Sving	11	1

Tilbehør Oversikt

- 10 11 Nakkeputer
- 12 13 14 Trekk
- 15 16 Seteputer
- 17 18 Ryggputer/-støtte
- 19 Fotpute
- 20 Belter
- 21 22 Diverse

Mål og dimensjoner

Mål og dimensjoner	Modell 17/40	Modell 17/45	Modell 17/50	Modell 17/55	Modell 17/60
Setehøyde foran min.	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	47 cm
Setehøyde foran maks.	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	57 cm
Setehøyde i oppreist stilling skråløft foran	57-64 cm	57-64 cm	57-64 cm	57-64 cm	55-62 cm
Setehøyde i oppreist stilling skråløft bak	71-78 cm	71-78 cm	71-78 cm	71-78 cm	73-80 cm
Setehøyde i oppreist stilling rettløft foran	72-79 cm	72-79 cm	72-79 cm	72-79 cm	-
Setehøyde i oppreist stilling rettløft bak	73-80 cm	73-80 cm	73-80 cm	73-80 cm	-
Setedybde min.	39 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Setedybde maks.	49 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Setebredde	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm
Rygghøyde	81-99 cm	81-99 cm	81-99 cm	81-99 cm	81-99 cm
Armleneavstand min (innvendig)	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm
Armleneavstand maks.	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm
Armlenehøyde min.	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Armlenehøyde maks.	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Bredde armlenepad	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm
Stolens største bredde	67 cm	72 cm	77 cm	82 cm	87 cm
Stolens største lengde	182 cm	182 cm	182 cm	182 cm	182 cm
Tilt i grader (ved tiltstol)	20°	20°	20°	20°	12°
Maks brukervekt	165 kg	165 kg	165 kg	165 kg	260 kg
Stolens vekt	57 kg	59 kg	61 kg	63 kg	79 kg

Arctic 17 Standard

Nakkepute

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Mål
40 cm	29042	240838	H: 23 cm, B: 30 cm
45 cm	29043	240865	H: 23, cm, B: 35 cm
50 cm	29334	240891	H: 23 cm, B: 40 cm
55 cm	29044	240918	H: 23 cm, B: 45 cm
60 cm	29045	240945	H: 23 cm, B: 50 cm

Nakkepute

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Mål
40 cm	29912	240821	H: 23 cm, B: 30 cm
45 cm	29913	240852	H: 23, cm, B: 35 cm
50 cm	29252	240879	H: 23 cm, B: 40 cm
55 cm	29914	240905	H: 23 cm, B: 45 cm
60 cm	29915	240932	H: 23 cm, B: 50 cm

Setepute

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Mål
40 cm	29326	240831	Dybde 50 cm
45 cm	29342	240858	Dybde: 52 cm
50 cm	29358	240884	Dybde: 52 cm
55 cm	29374	240911	Dybde: 52 cm
60 cm	29390	240938	Dybde: 52 cm

Setepute

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Mål
40 cm	29242	240811	Dybde: 50 cm
45 cm	29258	240842	Dybde: 52 cm
50 cm	29274	240869	Dybde: 52 cm
55 cm	29290	240895	Dybde: 52 cm
60 cm	29306	240922	Dybde: 52 cm

Fothvilepute

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Mål
40 cm	29336	240840	Høyde: 27 cm
45 cm	29352	240867	Høyde: 27 cm
50 cm	29368	240893	Høyde: 27 cm
55 cm	29384	240920	Høyde: 27 cm
60 cm	29400	240947	Høyde: 27 cm

Fothvilepute

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.	Mål
40 cm	29254	240824	Høyde: 27 cm
45 cm	29270	240855	Høyde: 27 cm
50 cm	29286	240881	Høyde: 27 cm
55 cm	29302	240908	Høyde: 27 cm
60 cm	29318	240935	Høyde: 27 cm



Ytterligere tilpasning av din Arctic 17

Nakkeproblemer	<ul style="list-style-type: none"> • Juster vinkelen på øvre ryggdel til ønsket posisjon • Velg nakkepute med riktig størrelse og mykhet. Se eksempler i tilbehørsoversikten
Balanseproblemer og behov for posisjonering i stolen	<ul style="list-style-type: none"> • Velg et av våre ryggtrekk for ekstra god støtte. For eksempel Ryggtrekk med ekstra god sidestøtte
Behov for ekstra tilpasning av rygg, f.eks. ved kyfose, scoliose og andre feilstillinger	<ul style="list-style-type: none"> • Benytt f.eks. Ryggtrekk komfort der fiberfyllet kan formes etter brukers behov
Nedsatt funksjon i fingrene og/eller hendene	<ul style="list-style-type: none"> • Benytt joystick-betjening i stedet for håndkontroll.
Behov for ekstra myk sittekomfort	<ul style="list-style-type: none"> • Benytt Setepute ekstra myk eller Trekk Supersoft • Benytt Ryggtrekk komfort
Behov for ekstra korsryggstøtte	<ul style="list-style-type: none"> • Benytt Oppblåsbar korsryggstøtte. Puten levers i to ulike størrelser. • Eventuel benytt Ryggpute Liten eller Ryggpute Stor som kan festes på ryggen etter behov
Inkontinensproblemer	<ul style="list-style-type: none"> • Benytt Inkontinenstrekk for sete, rygg , sete/rygg og eventuelt Inkontinenstrekk fotpute.
Risiko for trykksår	<ul style="list-style-type: none"> • Benytt Setepute med trykkavlastning, Setepute Gel, Trekk Supersoft eller plansete ved bruk av spesialputer
Behov for lengre benstøtte	<ul style="list-style-type: none"> • Benytt Forlengersett fotløftsaks. Fotputen kommer da 13 cm lengre frem
Behov for betjening på venstre side	<ul style="list-style-type: none"> • Svingspaken og feste for håndkontroll kan flyttes til venstre side på bestilling.
Risiko for å falle ut av stolen	<ul style="list-style-type: none"> • Benytt Belte Holding og/eller Belte Hofte
Behov for å flytte stolen uten å gå ut av den	<ul style="list-style-type: none"> • Benytt Hjulunderstell med sentralbrems

Tilbehør Nakkeputer



Nakkepute Adriana

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29471	240561
Beskrivelse	

Stor nakkepute fylt med sakkokuler i 2 kammer. Meget myk og god nakkepute som gir god støtte og former seg etter nakke og hode. Ved å regulere mengden sakkokuler kan mykhet og støtte endres. Sakkokuler avgir varme for stramme muskler. H: 19 cm, B: 35 cm, D: 9 cm.



Nakkepute Adriana

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29470	240553
Beskrivelse	

Stor nakkepute fylt med sakkokuler i 2 kammer. Meget myk og god nakkepute som gir god støtte og former seg etter nakke og hode. Ved å regulere mengden sakkokuler kan mykhet og støtte endres. Sakkokuler avgir varme for stramme muskler. H: 19 cm, B: 35 cm, D: 9 cm.



Nakkepute ekstra stor

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29479	240565
Beskrivelse	

Ekstra stor nakkepute fylt med sakkokuler i en kammer. Meget myk og god nakkepute som gir god støtte. Ved å regulere mengden sakkokuler kan mykhet og støtte endres. Sakkokuler avgir varme for stramme muskler. Høyde: 25 cm, Bredde: 40 cm, Dybde: 12 cm.



Nakkepute ekstra stor

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29478	240557
Beskrivelse	

Stor nakkepute fylt med sakkokuler i 2 kammer. Leveres med trekk i stoff. Meget myk og god nakkepute som gir god støtte. Ved å regulere mengden sakkokuler kan mykhet og støtte endres. Sakkokuler avgir varme for stramme muskler. H: 25 cm, B: 40 cm, D: 12 cm.



Nakkepute liten

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29473	240562
Beskrivelse	

Liten nakkepute i skum som gir en fastere pute. Høyde: 15 cm, Bredde: 37 cm, Dybde: 4 cm.



Nakkepute liten

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29472	240554
Beskrivelse	

Liten nakkepute i skum som gir en fastere pute. Høyde: 15 cm, Bredde: 37 cm, Dybde: 4 cm.



Nakkepute medium

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29475	240563
Beskrivelse	

Nakkepute i skum med dråpesnitt i medium størrelse. Kan brukes begge veier for å finne din komfortsone. H: 18 cm, B: 36 cm, D: 6,5 cm (dråpe).



Nakkepute medium

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29474	240555
Beskrivelse	

Nakkepute i skum med dråpesnitt i medium størrelse. Kan brukes begge veier for å finne din komfortsone. H: 18 cm, B: 36 cm, D: 6,5 cm (dråpe).



Nakkepute stor

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29477	240564
Beskrivelse	

Nakkepute i skum med dråpesnitt i stor størrelse. Kan brukes begge veier for å finne din komfortsone. H: 20 cm, B: 36 cm, D: 8,5 cm (dråpe).



Nakkepute stor

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29476	240556
Beskrivelse	

Nakkepute i skum med dråpesnitt i stor størrelse. Kan brukes begge veier for å finne din komfortsone.

H: 18 cm, B: 36 cm, D: 8,5 cm (dråpe).



Nakkepute stabil sidestøtte

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29485	240568
Beskrivelse	

Øvre ryggdel påmontert stabile, men myke sidestøtter (ørelapper). Dette gir meget god og stabil sidestøtte for hodet, samtidig som støtten er myk og behagelig. **Oppgi bredde på stol ved bestilling.** Dybde: 12 cm.



Nakkepute sidestøtte

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29484	240560
Beskrivelse	

Øvre ryggdel påmontert stabile, men myke sidestøtter (ørelapper). Dette gir meget god og stabil sidestøtte for hodet, samtidig som støtten er myk og behagelig. **Oppgi bredde på stol ved bestilling.** Dybde: 12 cm.



Nakkepute med dun

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29483	240567
Beskrivelse	

Stor nakkepute med dun.
Høyde: 45 cm, Bredde: 45 cm.



Nakkepute med dun

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29482	240559
Beskrivelse	

Stor nakkepute med dun.
Høyde: 45 cm, Bredde: 45 cm.



Nakkepute vatt ekstra stor

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29481	240566
Beskrivelse	

Stor og myk pute i vatt for ekstra støtte til hode og nakke..
Høyde: 25 cm, Bredde: 40 cm, Dybde: 12 cm



Nakkepute vatt ekstra stor

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29480	240558
Beskrivelse	

Stor og myk pute i vatt for ekstra støtte til hode og nakke.
Høyde: 25 cm, Bredde: 40 cm, Dybde: 12 cm



Nakkepute hundebein

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29284	240570
Beskrivelse	

Høyde: 20/23 cm, Bredde: 33 cm.



Nakkepute hundebein

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29285	240569
Beskrivelse	

Høyde: 20/23 cm, Bredde: 33 cm.

Tilbehør Trekk



Trekk supersoft

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29501	240601
45 cm	29503	240602
50 cm	29505	240603
55 cm	29507	240604
60 cm	29509	240605

Beskrivelse

Et eget trekk, som trekkes utenpå eksisterende trekk med innsydd Dacron i hele trekket. Gir en enda mykere og mer behagelig sittekomfort. Tykkelse 3 cm.



Trekk supersoft

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29500	240571
45 cm	29502	240572
50 cm	29504	240573
55 cm	29506	240574
60 cm	29508	240575

Beskrivelse

Et eget trekk, som trekkes utenpå eksisterende trekk med innsydd Dacron i hele trekket. Gir en enda mykere og mer behagelig sittekomfort. Tykkelse 3 cm.



Trekk supersoft +5 cm

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29511	240606
45 cm	29513	240607
50 cm	29515	240608
55 cm	29517	240609
60 cm	29519	240610

Beskrivelse

Et mykt og komfortabelt trekk for deg som ønsker økt komfort.



Trekk supersoft + 5 cm

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29510	240576
45 cm	29512	240577
50 cm	29514	240578
55 cm	29516	240579
60 cm	29518	240580

Beskrivelse

Et mykt og komfortabelt trekk for deg som ønsker økt komfort.



Ryggtrekk sidestøtte

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29521	240611
45 cm	29523	240612
50 cm	29525	240613
55 cm	29527	240614
60 cm	29529	240615

Beskrivelse

For ekstra god sidestøtte. Eget trekk som trekkes utenpå nedre ryggdel. Trekket har 2 langsgående kileformede kanaler med skum. Dette for å gi ekstra god sidestøtte. Mellom kilene er det sydd inn 2 cm Dacron. Meget godt egnet for deg med stabilitetsproblemer. Kilene starter sin oppbygning 10cm fra hver side av ryggen og bygger 10cm i dybden.



Ryggtrekk sidestøtte

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29520	240581
45 cm	29522	240582
50 cm	29524	240583
55 cm	29526	240584
60 cm	29528	240585

Beskrivelse

For ekstra god sidestøtte. Trekk som trekkes utenpå nedre ryggdel. Trekket har 2 langsgående kileformede kanaler med skum. Dette for å gi ekstra god sidestøtte. Mellom kilene er det sydd inn 2 cm Dacron. Meget godt egnet for deg med stabilitetsproblemer. Kilene starter sin oppbygning 10cm fra hver side av ryggen og bygger 10cm i dybden.



Ryggtrekk komfort

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29541	240616
45 cm	29543	240617
50 cm	29545	240618
55 cm	29547	240619
60 cm	29549	240620

Beskrivelse

Eget trekk som trekkes utenpå nedre ryggdel. Trekket har 3 tverrgående store kanaler i full bredde. Kanalene fylles med Dacron. Dette gir en myk og behagelig rygg som er meget godt egnet for deg med smerteproblematikk og stabilitetsproblemer.



Ryggtrekk komfort

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29540	240586
45 cm	29542	240587
50 cm	29544	240588
55 cm	29546	240589
60 cm	29548	240590

Beskrivelse

Eget trekk som trekkes utenpå nedre ryggdel. Trekket har 3 tverrgående store kanaler i full bredde. Kanalene fylles med Dacron. Dette gir en myk og behagelig rygg som er meget godt egnet for deg med smerteproblematikk og stabilitetsproblemer.



Ryggtrekk for moduloppbygging

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29561	240616
45 cm	29563	240617
50 cm	29565	240618
55 cm	29567	240619
60 cm	29569	240620

Beskrivelse

Et trekk med medfølgende kiler for oppbygning av rygg for brukere med spesielle ønsker til oppbygning av rygg.



Ryggtrekk for moduloppbygging

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29560	240586
45 cm	29562	240587
50 cm	29564	240588
55 cm	29566	240589
60 cm	29568	240590

Beskrivelse

Et trekk med medfølgende kiler for oppbygning av rygg for brukere med spesielle ønsker til oppbygning av rygg.



Inkontinenstrekk

Sete og rygg, Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29070	240779
45 cm	29072	240780
50 cm	29074	240781
55 cm	29076	240782
60 cm	29078	240783

Beskrivelse

Inkontinenstrekk for sete og rygg med påsydd inkontinensbarriere på innsiden. Trekket kan enkelt taes av og rengjøres. Leveres med påmontert vaskeanvisning.



Inkontinenstrekk

Sete og rygg, Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29069	240769
45 cm	29071	240770
50 cm	29073	240771
55 cm	29075	240772
60 cm	29077	240773

Beskrivelse

Inkontinenstrekk for sete og rygg med påsydd inkontinensbarriere på innsiden. Trekket kan enkelt taes av og rengjøres. Leveres med påmontert vaskeanvisning.

Tilbehør Trekk



Inkontinensstrekke sete

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29089	240784
45 cm	29091	240785
50 cm	29093	240786
55 cm	29095	240787
60 cm	29097	240788

Beskrivelse

Inkontinensstrekke for sete med påsydd inkontinensbarriere på innsiden. Trekket kan enkelt taes av og rengjøres. Leveres med påmontert vaskeanvisning.



Inkontinensstrekke sete

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29088	240774
45 cm	29090	240775
50 cm	29092	240776
55 cm	29094	240777
60 cm	29096	240778

Beskrivelse

Inkontinensstrekke for sete med påsydd inkontinensbarriere på innsiden. Trekket kan enkelt taes av og rengjøres. Leveres med påmontert vaskeanvisning.



Inkontinensstrekke fotpute

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29051	240754
45 cm	29053	240755
50 cm	29055	240756
55 cm	29057	240757
60 cm	29059	240758

Beskrivelse

Et trekk som trekkes over ditt originale fotputetrekk for økt beskyttelse. Dette forenkler rengjøring og bedrer hygien.



Inkontinensstrekke fotpute

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29050	240733
45 cm	29052	240734
50 cm	29054	240735
55 cm	29056	240736
60 cm	29058	240737

Beskrivelse

Et trekk som trekkes over ditt originale fotputetrekk for økt beskyttelse. Dette forenkler rengjøring og bedrer hygien.



Armlenebeskyttelse

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29063	240760

Beskrivelse

Et avtakbart og vaskbart trekk som legges over dine originale armlener for økt beskyttelse. Dette forenkler rengjøring og bedrer hygien.



Armlenebeskyttelse


Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29062	240759

Beskrivelse

Et avtakbart og vaskbart trekk som legges over dine originale armlener for økt beskyttelse. Dette forenkler rengjøring og bedrer hygien.

Tilbehør Seteputer

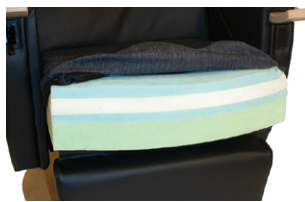

Setepute trykkavlastning

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29813	240697
45 cm	29815	240698
50 cm	29817	240699
55 cm	29819	240700
60 cm	29821	240701
Beskrivelse		

Med 3 cm trykkavlastende skum.
Dybde: 52 cm, Tykkelse: 11 cm.



Setepute trykkavlastning

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29812	240667
45 cm	29814	240668
50 cm	29816	240669
55 cm	29818	240670
60 cm	29820	240671
Beskrivelse		

Med trykkavlastning.
Dybde: 52 cm, Tykkelse: 11 cm.



Setepute i gel

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29838	240702
45 cm	295840	240703
50 cm	29842	240704
55 cm	29844	240705
60 cm	29846	240706
Beskrivelse		

Består av skum og gellommer. En mykere pute for økt trykkavlastning for å unngå sittesår.
Dybde 52 cm, Tykkelse 11 cm.



Setepute i gel

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29837	240672
45 cm	29839	240673
50 cm	29841	240674
55 cm	29843	240675
60 cm	29845	240676
Beskrivelse		

Består av skum og gellommer. En mykere pute for økt trykkavlastning for å unngå sittesår.
Dybde 52 cm, Tykkelse 11 cm.



Setepute dyp

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29788	240692
45 cm	29790	240693
50 cm	29792	240694
55 cm	29794	240695
60 cm	29796	240696
Beskrivelse		

En dypere setepute for deg som synes standard pute er for kort. Dybde 55 cm, Tykkelse 11 cm.



Setepute dyp

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29787	240662
45 cm	29789	240663
50 cm	29791	240664
55 cm	29793	240665
60 cm	29795	240666
Beskrivelse		

En dypere setepute for deg som synes standard pute er for kort. Dybde 55 cm, Tykkelse 11 cm.

Setepute Coxit

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29738	240682
45 cm	29740	240683
50 cm	29742	240684
55 cm	29744	240685
60 cm	29746	240686
Beskrivelse		

Coxit sete lages av et standard sete hvor Hepro reduserer høyden høyre eller venstre side i en ønsket vinkling for å øke komforten for brukere med f.eks. stivt kneledd. **Oppgi side og mål ved bestilling.**

Setepute Coxit

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29737	240652
45 cm	29739	240653
50 cm	29741	240654
55 cm	29743	240655
60 cm	29745	240656
Beskrivelse		

Coxit sete lages av et standard sete hvor Hepro reduserer høyden høyre eller venstre side i en ønsket vinkling for å øke komforten for brukere med f.eks. stivt kneledd. **Oppgi side og mål ved bestilling.**

Setepute oppbygd

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29713	240677
45 cm	29715	240678
50 cm	29717	240679
55 cm	29719	240680
60 cm	29721	240681
Beskrivelse		

Sete som bygges opp fra standard sete hvor Hepro øker høyre eller venstre side i en ønsket vinkling for å øke komforten for brukere med spesielle behov. **Oppgi side og mål ved bestilling.**

Tilbehør Seteputer



Setepute oppbygd

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29712	240647
45 cm	29714	240648
50 cm	29716	240649
55 cm	29718	240650
60 cm	29720	240651

Beskrivelse

Sete som bygges opp fra standard sete hvor Hepro øker høyre eller venstre side i en ønsket vinkel for å øke komforten for brukere med spesielle behov. **Oppgi side og mål ved bestilling.**

Setepute lav

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29763	240687
45 cm	29765	240688
50 cm	29767	240689
55 cm	29769	240690
60 cm	29771	240691

Beskrivelse

Sittepute i halv tykkelse (5 cm) for å oppnå en lavere sitte høyde.




Setepute lav

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29762	240657
45 cm	29764	240658
50 cm	29766	240659
55 cm	29768	240660
60 cm	29770	240661

Beskrivelse

Sittepute i halv tykkelse (5 cm) for å oppnå en lavere sitte høyde.

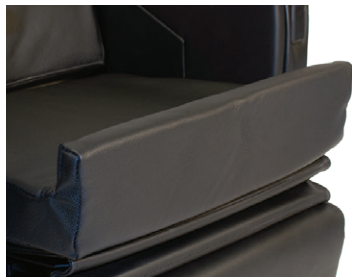

Plansete lite

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29863	240707
45 cm	29865	240708
50 cm	29867	240709
55 cm	29869	240710
60 cm	29871	240711

Beskrivelse

Plansete kan brukes begge veier slik at kanten er foran eller bak. Dybde: 45 cm.



Plansete 2008 stor

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29888	240712
45 cm	29890	240713
50 cm	29892	240714
55 cm	29894	240715
60 cm	29896	240716

Beskrivelse

Plansete kan brukes begge veier slik at kanten er foran eller bak. Dybde: 50 cm.

Tilbehør Ryggputer/-støtte



Ryggpute liten

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29681	240639
45 cm	29681	240639
50 cm	29683	240640
55 cm	29683	240640
60 cm	29685	240641

Beskrivelse

Med belte. Skumpute med trekantformet snitt. Trekket er formet slik at puten kan festes rundt ryggen på stolen. Den kan dermed festes hvor som helst på ryggen etter behov. Høyde: 19 cm.



Ryggpute liten

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29680	240631
45 cm	29680	240631
50 cm	29682	240632
55 cm	29682	240632
60 cm	29684	240633

Beskrivelse

Med belte. Skumpute med trekantformet snitt. Trekket er formet slik at puten kan festes rundt ryggen på stolen. Den kan dermed festes hvor som helst på ryggen etter behov. Høyde: 19 cm.



Ryggpute stor

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29687	29687
45 cm	29687	29687
50 cm	29689	240643
55 cm	29689	240643
60 cm	29691	240644

Beskrivelse

Med belte. Skumpute med trekantformet snitt. Trekket er formet slik at puten kan festes rundt ryggen på stolen. Den kan dermed festes hvor som helst på ryggen etter behov. Høyde: 24 cm.



Ryggpute stor

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29686	240634
45 cm	29686	240634
50 cm	29688	240635
55 cm	29688	240635
60 cm	29690	240636

Beskrivelse

Med belte. Skumpute med trekantformet snitt. Trekket er formet slik at puten kan festes rundt ryggen på stolen. Den kan dermed festes hvor som helst på ryggen etter behov. Høyde: 24 cm.



Rygg med bolstøtte

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29551	240601
45 cm	29553	240602
50 cm	29555	240603
55 cm	29557	240604
60 cm	29559	240605

Beskrivelse

Bolstøtten er 30 cm høy og 15 cm dyp på hver side av ryggen.



Rygg med bolstøtte

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29550	240571
45 cm	29552	240572
50 cm	29554	240573
55 cm	29556	240574
60 cm	29558	240575

Beskrivelse

Bolstøtten er 30 cm høy og 15 cm dyp på hver side av ryggen.

Tilbehør Ryggputer/-støtte



Korsryggstøtte liten

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29705	240645
Beskrivelse	

Med belte. Oppblåsbar luftpute med trekk i hud eller stoff og egen håndpumpe. Puten kan festes hvor som helst på stolryggen etter behov. 20x40 cm.



Korsryggstøtte liten

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29704	240637
Beskrivelse	

Med belte. Oppblåsbar luftpute med trekk i hud eller stoff og egen håndpumpe. Puten kan festes hvor som helst på stolryggen etter behov. 20x40 cm.



Korsryggstøtte, stor

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29707	240646
Beskrivelse	

Med belte. Oppblåsbar luftpute med trekk i hud eller stoff og egen håndpumpe. Puten kan festes hvor som helst på stolryggen etter behov. 25x50 cm.



Korsryggstøtte, stor

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29706	240638
Beskrivelse	

Med belte. Oppblåsbar luftpute med trekk i hud eller stoff og egen håndpumpe. Puten kan festes hvor som helst på stolryggen etter behov. 25x50 cm.



Støttepute Toril

Stoff (svart)

Art. nr.	HMS-nr.	Modell
27390	145447	Stoff (svart), se bilde
29386	240767	Stoff (blå)
29387	-	Hud (svart)
Beskrivelse		

Løs og fleksibel polsepute for brukertilpasset oppbygning og støtte.
Lengde: 100 cm, Tykkelse: 20cm, Dybde: 10 cm

Tilbehør Fotpute



Fotpute med forhøyertrekk

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29933	240739
45 cm	29935	240740
50 cm	29937	240741
55 cm	29939	240742
60 cm	29941	240743

Beskrivelse

Øker høyden på standard fotpute med 3 cm.



Fotpute med forhøyertrekk

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29932	240718
45 cm	29934	240719
50 cm	29936	240720
55 cm	29938	240721
60 cm	29940	240722

Beskrivelse

Øker høyden på standard fotpute med 3 cm.



Fotpute med sidestøtte

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29958	240744
45 cm	29960	240745
50 cm	29962	240746
55 cm	29964	240747
60 cm	29966	240748

Beskrivelse

4,5 cm høye sidestøtter.



Fotpute med sidestøtte

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29957	240723
45 cm	29959	240724
50 cm	29961	240725
55 cm	29963	240726
60 cm	29965	240727

Beskrivelse

4,5 cm høye sidestøtter.



Løs fothvilerpute

Hud

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29011	240749
45 cm	29013	240750
50 cm	29015	240751
55 cm	29017	240752
60 cm	29019	240753

Beskrivelse

Laget av fast skum. D: 12 cm, H: 16 cm.



Løs fothvilerpute

Stoff

Bredde	Art. nr.	HMS-nr.
40 cm	29010	240728
45 cm	29012	240729
50 cm	29014	240730
55 cm	29016	240731
60 cm	29018	240732

Beskrivelse

Laget av fast skum. D: 12 cm, H: 16 cm.



Fotpute ekstra bred

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29928	240738

Beskrivelse

Bredde: 70 cm.



Fotpute ekstra bred

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29927	240717

Beskrivelse

Bredde: 70 cm.

Tilbehør Belter



Belte Holding

Liten

Art. nummer	HMS-nummer
27850	159288
Beskrivelse	

Størrelse barn.



Belte Holding

Medium

Art. nummer	HMS-nummer
27851	159287
Beskrivelse	

Størrelse mindre voksne.



Belte Holding

Stor

Art. nummer	HMS-nummer
27852	159286
Beskrivelse	

Størrelse voksne.



Belte Holding

Ekstra stor

Art. nummer	HMS-nummer
27853	159289
Beskrivelse	

Størrelse store voksne.



Belte hofte

Liten

Art. nummer	HMS-nummer
27847	159285
Beskrivelse	

Hoftebelte som gir effektiv og behagelig støtte og forbedrer stabiliteten i bekkenet.



Belte hofte

Medium

Art. nummer	HMS-nummer
27848	159284
Beskrivelse	

Hoftebelte som gir effektiv og behagelig støtte og forbedrer stabiliteten i bekkenet.



Belte hofte

Stor

Art. nummer	HMS-nummer
27849	159283
Beskrivelse	

Hoftebelte som gir effektiv og behagelig støtte og forbedrer stabiliteten i bekkenet.



Håndkontroll

Modell	Art. nr.	HMS-nr.
Tilt (6 knapper)	61815	240804
Standard (4 knapper)	61816	240805
Synkron (2 knapper)	61817	240806

Tilbehør Diverse



Avislomme

Hud

Art. nummer	HMS-nummer
29068	240765
Beskrivelse	

Romslig lomme som henges over armlenet på høyre eller venstre side av stolen. For oppbevaring av aviser, magasiner og andre ting du ønsker å ha i umiddelbar nærhet.



Avislomme

Stoff

Art. nummer	HMS-nummer
29067	240764
Beskrivelse	

Romslig lomme som henges over armlenet på høyre eller venstre side av stolen. For oppbevaring av aviser, magasiner og andre ting du ønsker å ha i umiddelbar nærhet.



Bord rundt

Art. nummer	HMS-nummer
26591	097975
Beskrivelse	

Rundt avlastningsbord til for eksempel kaffekoppen. Monteres under armlenet på høyre eller venstre side. Diameter 27,5 cm.



Bord rektangulært

31x41 cm

Side	Art. nummer	HMS-nr.
Venstre	27839	159281
Høyre	26592	097974
Beskrivelse		


Bordplate for montering på høyre eller venstre side av stolen. Monteres på rammen av stolen. Perfekt for deg som vil lese, skrive eller bruke laptop i stolen.



Forlengersett fotløftsaks

Art. nummer	HMS-nummer
29382 (stoff)	240762 (stoff)
29383 (hud)	240763 (hud)
Beskrivelse	

Eget sakseledd som enkelt monteres inn i fotløftmekanismen slik at fotputen kommer 13 cm lengre ut. Inkluderer skjøtestykke i stoff eller hud.

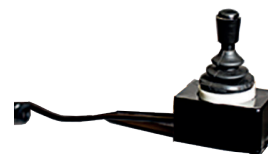

Joystickbetjening

Art. nummer	HMS-nummer
28684	232478
28909 (tilt)	232479 (tilt)
Beskrivelse	

Joystick monteres på eget regulerbart feste ved armlenet på høyre eller venstre side. Denne kan store 2 motorer. Ved 3-motors stol må siste motor styres med egen bryter.



Batteribackup

Art. nummer	HMS-nummer
28683	240794
Beskrivelse	

Hvis man ikke har tilgang til strøm, f.eks. på hytta eller ved ustabilt strømnett kan batteribackup benyttes. Denne har oppladbare batterier som tillater å kjøre stolen noen ganger opp og ned slik at stolen ikke blir stående fast i en bestemt posisjon.



Sokkelplate

Ekstra Stor

Art. nummer	HMS-nummer
28627	240795
Beskrivelse	

Passer til alle modellene i 40/45/50/55 cm bredde.



Kule i front av trearmene

Art. nummer	HMS-nummer
80007	240761
Beskrivelse	

En kule i front av armlenet for økt grep ved inn og utstinging av stolen.

Tilbehør Diverse



Lettere sving

Art. nummer	HMS-nummer
28902	232477
Beskrivelse	

Andefotgrep som gjør svingfunksjonen lettere. For de med nedsatt styrke og fingre.



Krykkeholder

Art. nummer	HMS-nummer
26565	009638
Beskrivelse	

Kan monteres på begge sider.



Knappeforhøyer

Art. nummer	HMS-nummer
29640	240796
Beskrivelse	

Gjennomsiktig gummiknapp som legges over fjernkontrollen. Denne hever knappene og gjør de enklere å betjene for svaksynte.



Hjulunderstell
Med sentralbrems

Art. nummer	Passer til
29085	Standard
29641	Tilt
Beskrivelse	

Hjulunderstell til din Arctic 17 løftestol som gjør at bruker enklere kan flyttes uten at bruker trenger å forlate stolen. Understellet leveres med fotbrems.



El-rotasjon

Bredde	Art. nr.	Passer til
40-55 cm	29984	Tilt
40-55 cm	29993	Standard
60 cm	29901	Tilt
60 cm	29903	Standard
Beskrivelse		

Elektrisk rotasjon av stolen ved hjelp av fjernkontroll. Passer de med nedsatt styrke eller nedsatt funksjonsevne i ben.

Adapter for endring av ryggvinkel

Art. nummer	HMS-nummer
28839	216103
Beskrivelse	

Adapteret skyver ryggen ytterligere frem i alle posisjoner. Ryggen skyves i gjennomsnitt 5 grader fremover.



Mestring • Trygghet • Trivsel

Se og bestill våre produkter på hepro.no

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige førstevalget for våre kunder.

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter. Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å levere produkter tilpasset dine individuelle behov.



RING OSS
46 74 55 55

Revisjon
nr. 1 - 2019



marked@hepro.no

HEPRO AS
Øvermoan 9
8250 Rognan