



PRODUKTARK

RISE N TILT BADETOILETSTOL

Robust badetoiletstol, der løfter og tilter den bariatriske bruger til en 30° hældning. En gennemtænkt og sikker kombinationsstol, der tager hensyn til både bruger og plejer i hver eneste badesituation.

Rise N Tilt Badetoiletstol bruges på plejecentre, institutioner og hospitaler.
Brugervægt 325 kg.



- Bremses påsat alle fire hjul.
- Kan vaskes i vasketunnel.
- Mulighed for ekstra brede butterfly armlæn.
- Fjernbetjening giver plejer let adgang til de elektriske funktioner.
- Sikrer bedre arbejdsmiljø for plejer og en behagelig og sikker badeoplevelse for bruger.
- Justerbar sædehøjde og sædedybde.
- Flere typer af benstøtter.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Anvendelse

Rise N Tilt Badetoiletstol er designet til at løfte og tilte den bariatriske bruger i forbindelse med personlig pleje på badeværelset og i brusebadet.

Rise N Tilt Badetoiletstol er beregnet til indendørs brug på fx hospitaler, plejecentre og institutioner.

Rise N Tilt Badetoiletstol er beregnet til brugere op til 325 kg med nedsat fysisk funktionsevne.

Konstruktion

Rise N Tilt Badetoiletstol med hjul har en siddebredde på 66 cm. Sædet er fem cm højt og lavet af PU-skum.

Fodstøtterne er aftagelige og indstilles i højde. Fodpladernes placering kan også justeres. Det gør, at brugere med meget væv på indersiden af lårene sidder komfortabelt i badetoiletstolen.

Under ryglænet er der stor frigang ned til sædet, til vævet i glutealregionen. Det sikrer støtte i ryggen og tillader plejepersonalet at række ind efter et sejl til placering af bruger.

Funktionelle armlæn

Rise N Tilt Badetoiletstol udstyret med ekstra lange armlæn (64 cm) som stikker frem foran siddefladerne. Det gør ind- og udstigning nemmere for bruger. Armlænene er desuden aftagelige og svingbare.

Rengøring og vedligeholdelse

Rise N Tilt Badetoiletstolens stel, sæde og armlæn kan rengøres med vand og almindeligt rengøringsmiddel.

Rise N Tilt Badetoiletstol kan desuden vaskes i vasketunnel på fx depot eller hospital.

Sædet kan fjernes og desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Opbevaring og transport

Når Rise N Tilt Badetoiletstol ikke er i brug, bør den opbevares tørt og i temperaturer mellem -10° til +40°C og i en luftfugtighed på maks. 80%.

Dette gælder også ved langtidsopbevaring (+3 måneder).

Batteriet bør være 40-60% opladt før langtidsopbevaring. Batteriet oplades minimum 10 timer efter langtidsopbevaring.

Rise N Tilt Badetoiletstol kan bruges i omgivelser med en temperatur fra -10° til +40°C.

Fjernbetjening

Badetoiletstolens løft- og tiltfunktion styres af fire aktuatorer placeret under sædet. Tiltfunktionen aktiveres med den påmonterede fjernbetjening. Fjernbetjeningen kan bruges af både bruger og plejepersonale.

Ved behov for ekstra bredde, påsættes to butterfly armlæn, som giver 14 cm mere plads mellem armlænene.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen, der kan hænge på skubbebøjlen, giver plejepersonalet nem adgang til løft- og tiltfunktionen. Ved fuldt opladet batteri kan kørestolen tilte helt op og ned ca. 15 gange. Det tager op til 10 timer at oplade batteriet.

Med 25% tilbage af batteriet, kan badetoiletstolen kun køre ned. Det sikrer, at brugeren altid kan liftes ned.

Aktuatorer

Rise N Tilt Badetoiletstol er udstyret med fire aktuatorer, monteret under sædet. Det er disse fire aktuatorer, der gør, at Rise N Tilt badetoiletstol kan løfte og tilte.

Fjernbetjening og styreboks kan desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Håndtering af batterier

Batteriets levetid kan forlænges ved at blive ladet op, selvom det ikke er helt afladet.

Hvis styreboksen ikke skal bruges i længere tid (dage og uger), bør batteriet tages ud af styreboksen for at undgå dybdeafledning og skader på batteriet.

Transport

Rise N Tilt Badetoiletstol er (uden bruger) egnet til land- og/eller lufttransport. Rise N Tilt Badetoiletstol kan ikke klappes sammen, da rammen er fast.

Rise N Tilt Badetoiletstol tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres i motoriseret køretøj.

Specifikationer

Maks. brugervægt	325 kg
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI DI	5740000100005N4
Forventet holdbarhed	7 år
Forventet holdbarhed batteri	2-3 år
Totallængde i laveste position	1400 mm
Siddebredde	660 mm
Totalbredde med standard armlæn/butterfly armlæn	740/850 mm
Bredde mellem standard armlæn/butterfly armlæn	610/750 mm
Sædedybde	420/480/540 mm
Sædehøjde	55 mm
Bredde toiletåbning	Ø 240 mm, 350 mm lang
Afstand fra gulv til undersiden af sæde/skubbebøjle	445/1000mm
Afstand fra sæde til fodstøtter	390/420/440/460/480 mm
Samlet vægt af Rise N Tilt	46 kg
Svingbare armlæn	Ja
Fodstøtter svingbare og højdeindstillelige	Ja
Op/ned kapacitet ved fuldt opladet batteri	Ca. 15 gange
Venderadius	1580 mm
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Låsbare hjul	Ø150 mm med bremse
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
IP-klassifikation	IPX6
ISO-klassifikation	09 12 03 23
Aktuatorer (4 styks)	LINAK A20/A40
Fjernbetjening/Styreboks	LINAK
Risikovurdering	EN/ISO 14971: 2012
Generelle krav og prøvningsmetoder	EN 12182, EN/ISO 10535
Overfladetemperaturen på Rise N Tilt Badetoiletstol kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

Bestilling, tilbehør og reservedele

Model, tilbehør og reservedele	Varenummer
Rise N Tilt Badetoiletstol (siddebredde 66 cm) med standard armlæn, standard fodstøtter, lader, nakkestøtte og spand	0157-066-000
Butterfly armlæn højre (giver 7 cm ekstra bredde mellem armlænet)	0150-999-012R
Butterfly armlæn venstre (giver 7 cm ekstra bredde mellem armlænet)	0150-999-012L
Nakkestøtte justerbar	0156-999-020
Sæde helt med låg til Rise N Tilt Badetoiletstol	0150-999-023
Bækkenspand med låg plast	0140-999-001
Fodstøtte standard Rise N Tilt Badetoiletstol højre	0156-999-090H
Fodstøtte standard Rise N Tilt Badetoiletstol venstre	0156-999-090V
Elevérbar benstøtte til Rise N Tilt Badetoiletstol højre	0156-999-030
Elevérbar benstøtte til Rise N Tilt Badetoiletstol venstre	0156-999-031
Batteri til Rise N Tilt Badetoiletstol	0156-999-050

