



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUKTARK

Badetoiletstol Clean

Stærk og funktionel badetoiletstol udviklet til den bariatriske bruger.

Badetoiletstol Clean er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg.



- Nem at rengøre
- Stærk konstruktion
- Flere indstillingsmuligheder
- Vægtkapacitet op til 325 kg



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.




Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Badetoiletstol til den bariatriske bruger

Badetoiletstol Clean bruges til toiletbesøg og til badesituationer i vådrumsmiljøer (fx bruserum).

Badetoiletstol Clean bruges på hospitaler, i plejeboliger, i private hjem og på institutioner til brugere op til 325 kg.

 Badetoiletstol Clean må ikke bruges i bassiner eller i swimmingpools.

Konstruktion

Badetoiletstol Clean er lavet af letvægtsrør, der sikrer mest mulig stabilitet og lav vægt. Rørene er desuden overfladebehandlet.

Armlænene går ud over siddefladerne, hvilket gør det nemt at få et godt greb ved ind- og udstigning.

Indstilling og montering

Clean består af to dele, stolens ramme og ryglænet.

Ramme og ryglæn samles ved hjælp af skiver og bolte, der indsættes i de forberede huller på stolens ramme.

Værktøj medfølger ved køb.

Justering af sædedybde og ryglæn

Sædedybden kan justeres i tre positioner. Vælg den ønskede sædedybde ud fra de to huller (forreste, midterste eller bageste) på ryglænet.

Rengøring og vedligeholdelse

Badetoiletstolens stel, sæde og armlæn kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Desinfektion

Sædet kan fjernes og desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Transport og opbevaring

Når Badetoiletstol Clean ikke er i brug, bør den opbevares tørt og mellem -10° - 40°C.

Badetoiletstol Clean er egnet til land- og/eller lufttransport. Badetoiletstol Clean kan skilles ad inden eventuel transport.

Badetoiletstol Clean findes i to bredder, 61 cm og 71 cm. Tallet svarer til afstanden mellem håndtagene.

Kontakt os på 7025 2522 for råd og vejledning inden bestilling.

Ryglænet kan flyttes +/- 6 cm. De buede rør sikrer en god siddekomfort.

Bade- og toiletstolens sædehøjde er justerbar fra 44-59 cm.

Justering af benenes højdeindstillinger


Højden på benene kan justeres i seks positioner ved at løsne og stramme de fire bolte, der allerede er monteret på benene.

Under brug

Sæderyggen kan indstilles i tre forskellige dybder. Justering af sædedybden påvirker ikke stolens stabilitet.

 Desinficer altid Badetoiletstol med hjul, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Bolte og låsemøtrikker skal jævnligt efterses og evt. efterspændes.

 Manglende overholdelse af eftersyn af bolte kan medføre fejlfunktion.

Langtidsopbevaring

Ved langtidsopbevaring (over tre måneder) af Badetoiletstol med hjul bør den opbevares i mellem -10° - 40°C og i en luftfugtighed, der ikke overstiger 80%.

Specifikationer

Specifikationer, model 61 cm og 71 cm	
Brugervægt maks.	325 kg
Sædebredde	61/71 cm
Sædedybde justerbar	40-52 cm
Sædehøjde justerbar	44-59 cm
Afstand mellem armlæn	65/75
Totalbredde over armlæn	73/83 cm
Totalhøjde	79-94 cm
Totallængde (fra fod til rygbøjlen)	80-101 cm
Bredde toiletåbning	Ø 24 cm, 35 cm lang
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
Ramme	Krom molybdæn stål/SAE41-30
Vægt (61 cm/71 cm)	14/15 kg
ISO - klassifikation	09 33 07 03
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000101288/5740000101295
Grundlæggende UDI	5740000100003MY
Generelle krav og prøvningsmetoder	EN 12182
Overfladetemperaturen på Badetoiletstol Clean kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

Bestilling

Model	HMI-nummer	Varenummer
Bariatrisk Badetoiletstol Clean, 61 cm	52000	0142-061-000
Bariatrisk Badetoiletstol Clean, 71 cm	52001	0142-071-000
Dupsko, 1 styk.		0140-999-112
Bækkenspand med plastlåg		0140-999-001
Nyt sæde med låg, badetoiletstol Clean, 61 cm		0150-999-022
Nyt sæde med låg, badetoiletstol Clean, 71 cm		0150-999-023