



PRODUKTARK

Badetoiletstol med drivhjul

Stærk og bred badetoiletstol med drivhjul, der bidrager til større selvstændighed for brugeren. Justerbare fodstøtter, så brugere med meget væv på lårene kan sidde komfortabelt.

Badetoiletstol med hjul bruges på plejecentre, institutioner og hospitaler. Brugervægt op til 325 kg.



- Sikrer større selvstændighed for bruger.
- Bremses påsat to hjul.
- Fås i to størrelser, 61 cm og 71 cm.
- Sikrer bedre arbejdsmiljø for plejer og en behagelig og sikker badeoplevelse for bruger.
- Mulighed for butterfly armlæn, der giver ekstra bredde mellem armlænen.
- Flere typer af benstøtter.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Badetoiletstol med drivhjul

Badetoiletstol med drivhjul er designet til den bariatriske bruger i forbindelse med forflytning til og fra badeværelset, i brusebadet og ved toiletbesøg. Denne model med drivhjul kan være med til at øge brugers selvstændighed.

Badetoiletstol med hjul er beregnet til indendørs brug på fx hospitaler, plejecentre og institutioner.

Badetoiletstol med hjul er beregnet til brugere op til 325 kg med nedsat fysisk funktionsevne.

Konstruktion

Bariatrisk badetoiletstol med drivhjul fås i to sædebredder, 61 cm og 71 cm. Stolen har et 5 cm højt PU skumsæde og 7 cm åbning mellem sæde og armlæn.

Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver og kan indstilles i både højden og i bredden op til et ydre mål på 110 cm. Det gør, at brugere med meget væv på lårene også kan sidde komfortabelt i stolen.

Under ryglænet er der en frigang ned til sædet på 32 cm, til vævet i glutealregionen. Det sikrer støtte i ryggen og tillader plejepersonalet at række ind efter et sejl til korrekt placering af bruger.

Rengøring og vedligeholdelse

Badetoiletstolens stel, sæde og armlæn kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Desinfektion

Sædet kan fjernes og desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.


Transport og opbevaring

Når Badetoiletstol med hjul ikke er i brug, bør den opbevares tørt og mellem -10° - 40°C.

Badetoiletstol med hjul er (uden bruger) egnet til land- og/eller lufttransport. Badetoiletstol med hjul kan ikke klappes sammen, da rammen er fast.

For at undgå skader på fx ryg, frarådes det, at plejepersonale bærer den 33 kg tunge badetoiletstol. Badetoiletstol med hjul tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres i motoriseret køretøj.

Badetoiletstol med hjul kan bruges i omgivelser med en temperatur fra -10° - 40°C og i en luftfugtighed mellem 20-80%.

 Badetoiletstol med hjul er ikke beregnet til at køre over forhindringer som dørtrin etc.

Badetoiletstol med hjul må kun køres på plant, hårdt underlag for at undgå risikoen for tipning.

Kontakt Cobi Rehab på 7025 2522 for råd og vejledning inden bestilling.

Funktionelle armlæn

Bariatriske brugere har ofte svært ved at få fat i armlænet på en stol ved indstigning pga. af den store mængde væv på armene.


Derfor er badetoiletstolen udstyret med ekstra lange armlæn på hele 64 cm, som desuden stikker 7 cm frem foran siddefladen.

Det gør, at bruger bedre kan få fat med hænderne ved ind- og udstigning, til gavn for både plejepersonalet og bruger. Armlænene er aftagelige og svingbare.

Ved behov for ekstra bredde, kan badetoiletstolen påsættes butterfly armlæn, som giver ekstra plads i siddebredden.

 Desinficer altid Badetoiletstol med hjul, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Bolte og låsemøtrikker skal jævnligt efterses og evt. efterspændes.

 Manglende overholdelse af eftersyn af bolte kan medføre fejlfunktion.

Langtidsopbevaring

Ved langtidsopbevaring (over tre måneder) af Badetoiletstol med hjul bør den opbevares i mellem -10° - 40°C og i en luftfugtighed, der ikke overstiger 80%.

Specifikationer

Maks. brugervægt	325 kg
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI DI	5740000100004N2
Forventet holdbarhed	7 år
Totallængde	1290 mm
Totalbredde med standard armlæn (uden fodstøtter)	780/880 mm
Totalbredde med butterfly armlæn (uden fodstøtter)	870/970 mm
Sædebredde med standard armlæn	610/710 mm
Sædebredde butterfly armlæn	750/850 mm
Sædedybde	560 mm
Sædehøjde	550 mm
Armlænsbredde	60 mm
Breddetoiletåbning	Ø 240 mm, 350 mm lang
Afstand fra gulv til undersiden af sæde	445 mm
Afstand fra gulv til skubbebøjle	1000 mm
Afstand fra sæde til ryggens øverste kant	450 mm
Afstand fra sæde til fodstøtter	400/420/440/460/480 mm
Samlet vægt af Badetoiletstol med drivhjul	33 kg
Svingbare armlæn	Ja
Fodstøtter svingbare og højdeindstillelige	Ja
Fodstøttebelægning	PU skum
Låsbare hjul	Ja, 2 styks
Venderadius	1580 mm
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Drivhjul/ hjul	24" faste, punkterfrie, 2 styks. / Ø125 mm, faste, 2 styks
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
IP-klassifikation	IPX4
ISO-klassifikation	09 12 03 24
Risikovurdering	EN/ISO 14971: 2012
Generelle krav og prøvningsmetoder	EN 12182
Overfladetemperaturen på Badetoiletstolen kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

Bestilling, tilbehør og reservedele

Model, tilbehør og reservedele	Varenummer
Badetoiletstol med standard armlæn, standard fodstøtter og spand, 61 cm	0152-061-000
Badetoiletstol med standard armlæn, standard fodstøtter og spand, 71 cm	0152-071-000
Badetoiletstol med butterfly armlæn, standard fodstøtter og spand, 61 cm	0153-061-000
Badetoiletstol med butterfly armlæn, standard fodstøtter og spand, 71 m	0153-071-000
Bækkenspand med låg plast	0140-999-001
Fodstøtte standard badetoiletstol højre	0150-999-008
Fodstøtte standard badetoiletstol venstre	0150-999-009
Elevérbar benstøtte til badetoiletstol højre	0156-999-030
Elevérbar benstøtte til badetoiletstol venstre	0156-999-031
Butterfly armlæn højre (giver 7 cm ekstra bredde mellem armlænet)	0150-999-012R
Butterfly armlæn venstre (giver 7 cm ekstra bredde mellem armlænet)	0150-999-012L
Sæde helt med låg til badetoiletstol, 61 cm	0150-999-022
Sæde helt med låg til badetoiletstol, 71 cm	0150-999-023

