



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUKTARK

Eclipse – bariatrisk kørestol

Manuel kørestol i tidløst design beregnet til brugere op til 270 kg. Fås også i forstærket udgave op til 450 kg. Mange indstillingsmuligheder.

Eclipse Kørestol bruges på plejecentre og hospitaler samt i hjemmeplejen og private hjem til brugere med behov for en komfort kørestol med trykaflastende sæde (tilkøb).



- Bruges i rehabiliteringen af den mobile bruger.
- Mulighed for justering af sædedybde og hældning samt ryglænets vinkel.
- Forlængede armlæn (tilkøb), der gør det lettere at komme ind og ud af kørestolen.
- Desinficerbar.
- Passer til de fleste døråbninger.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Anvendelse

Eclipse Kørestol er designet til indendørs brug på fx hospitaler, institutioner og i plejeboliger.

Kørestolen kan også bruges i private hjem og udendørs.

Eclipse Kørestol er beregnet til brugere op til 270 kg (forstærket udgave op til 450 kg), der har begrænset stand- og gangfunktion.

Den tilsigtede operatør af Eclipse Kørestol er en sundhedsuddannet fagperson, fx en terapeut, sygeplejerske eller en sosu-assistent.

Tilsigtede operatør kan også være brugeren med truncusstabilitet og funktionsevne til selv at kunne drive, styre og bremse kørestolen.

Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Eclipse Kørestol og målgruppen for kørestolen. Det indeholder også en lang række specifikationer på Eclipse Kørestol.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-form på cobirehab.com, som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Eclipse Kørestol kan bruges i omgivelser med en temperatur fra 0-40° C og i en luftfugtighed mellem 20-75%.

Ibrugtagning

Når Eclipse Kørestol tages i brug, bør bruger sammen med terapeut eller en anden sundhedsfaglig medarbejder udføre en række forskellige række-, fremadbøjnings- og forflytningsøvelser for at forstå sikkerhedsgrænserne for kørestolen.

Kontraindikationer

Brugere med nedsat kognitive funktionsevner skal overvåges og guides i forbindelse med brugen af Eclipse Kørestol.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om Eclipse Kørestol.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.



Eclipses opbygning sikrer stabilitet og balance.

Konstruktion

Eclipse Kørestol er en manuel fastramme kørestol opbygget af en stærk stålramme, som giver maksimal styrke, stivhed og lang holdbarhed. Den er designet, så størstedelen af brugers vægt hviler på baghjulene.

Dækkene er massive, hvilket gør fremdrift og styring let.

Eclipse Kørestol er udstyret med anti-tip støtter, så bruger kan stige ind og ud af kørestolen uden risiko for at vælte. Sædepladen er massiv og giver bruger et godt afsæt fra kørestolen.

Eclipse Kørestol kan udvides i sædebredden med montering af Eclipse Grow-kit og følger på den måde brugeren ved evt. kropsændring.

Monteringsmuligheden gør også Eclipse Kørestol velegnet til ombygning til anden bruger.

Eclipse Kørestol kan også forstærkes til en brugervægt op til 450 kg. Til det formål kan kørestolen leveres med stærke, hjælperbetjente skivebremser.

Tilpasningsmuligheder

Eclipse Kørestol kan monteres med forskellige rygsystemer, som tilgodeser de forskellige kropsformers behov. Stropryggen er konstrueret, så brugere med en voluminøs bagdel får god lændestøtte, hvilket er et overset problem.

Eclipse Kørestol har justerbar sædedybde, sædehøjde og sædevinkel, hvilket giver store tilpasningsmuligheder for den enkelte bruger.

Eclipse Kørestol leveres som standard uden benstøtter, men kan leveres med swing-away fodstøtter eller elevérbare benstøtter med lægpuder.

Eclipse Kørestol kan udstyres med forlængede armlæn, som gør det nemmere for den selvhjulpne bruger at sætte og rejse sig fra stolen.

Armlænene kan forstærkes yderligere.

Eclipse Kørestol kan anvendes med forskellige typer sædepuder. Eclipse Kørestol leveres som standard uden sædepude.



Anti-tip støtter.



Eclipse Grow-kit.



Elevérbare benstøtter med lægpude.



Eclipse med forlængede armlæn.

Justeringsmuligheder

Justering af rygramme

Sædedybden og rygvinklen kan justeres, så de passer til sædets ønskede højde og hældning.

Cobi Rehab eller anden forhandler kan tilpasse højden af rygrammen ved at forkorte rørene til ønsket længde med en nedstryger eller rørskærer.

Justering af polstring

Stropperne på bagsiden af rygpolstringen kan justeres ved enten at løsne eller stramme dem.

Justering af drivhjulsaksel

Eclipse Kørestolens to drivhjul er som udgangspunkt monteret i standardpositionen. Drivhjulsakslen kan monteres i fire forskellige positioner på sæderammen.

Rengøring

Eclipse Kørestolens stel, sæde, skubbehåndtag og ryglæn skal rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Opbevaring og transport

Når Eclipse Kørestol ikke er i brug, bør den opbevares tørt og i en temperatur mellem -10° - 50°C.

Langtidsopbevaring

Eclipse Kørestol bør opbevares mørkt og dækket af et tæppe eller lignende.

Eclipse Kørestol bør temperaturmæssigt opbevares mellem -10° - 50°C.

Justering af overramme, højde og hældning

Rammens højde og sædehældning er som udgangspunkt indstillet til standardpositionen. Sædehøjden og hældningen kan justeres i fem mulige højder og hældninger.

Justering af rammebredde

For at kunne justere rammebredden skal der bruges et udvidelsessæt (Eclipse Grow-kit) fra Cobi Rehab. Eclipse Grow-kit indeholder en sædeplade, en rygbøjle og polstring samt fem tværrammerør.

Monteringsvejledning medfølger. Kontakt evt. Cobi Rehab ved bestilling eller montering.

Desinficering

Kørestolens stel, sæde, armlæn og ryglæn kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70 % eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Kørestolspuden kan skiftes ved overgang til ny bruger.

Transport

Eclipse Kørestol er (uden bruger) egnet til land- og/eller lufttransport. Eclipse Kørestol kan ikke klappes sammen, da den har en fast ramme.

Kørestolen tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres uden bruger i et køretøj.

Eclipse Kørestol er crash testet. Det betyder, at den må bruges som sæde for bruger i køretøj. Kørestolen fastgøres i motoriseret køretøj ved hjælp af et Transit Tie-Down beslag (tilkøb).

De fire beslag er markeret med Transit Tie-Down symbolet og har fire punkter. Kørestols sædet skal køres helt i bund for at mindske risiko for skader.



Transit Tie-Down System beslaget må kun bruges med godkendte fastspændingssystemer, som overholder EU 214/2014.

Specifikationer

Maks. brugervægt	270/450 kg
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI DI	13829
Forventet holdbarhed	Minimum 7 år
Crash testet	Ja, i henhold til ISO 7176-19
Sædedybde	410 - 610 mm
Sædebredde	500 - 1220 mm
Sædehøjde	356 - 508 mm
Stropryg	Polypropylene
Rygvinkel	85° - 100°
Totallængde med benstøtter	1180 mm
Totalbredde	Sædebredde + 190 mm
Vægt kørestol	40 kg
Vægt af tungeste del	20 kg
Hældning ned ad bakke	Maks. 12°
Hældning op ad bakke	Maks. 12°
Hældning sideværts	Maks. 12°
Drivhjul	24" (580 mm x 30 mm) HD Spoke urethane
Forhjul	5" (127 mm x 32 mm)
Stelmateriale	Stål
Skubbebøjle, indstillige	Ja
Hjulgafler	HD stålgafler
Fodstøtterør	6061-T6 Aluminium
Fodplade	6061-T6 Aluminium/nylon med glasfiber
Venderadius (Pivot)	1545 mm
Sammenklappelig	Nej
Generelle krav og prøvningsmetoder	AS/NZS 3695,1:2011 ISO 7176-3, -8, -13, -19 og -22

Bestilling og tilbehør

Model/Sædebredde/Sædedybde	Varenummer
Eclipse ekskl. fodstøtter/55 cm/ 41-56 cm	0120-055-000
Eclipse ekskl. fodstøtter/61 cm/ 41-56 cm	0120-061-000
Eclipse ekskl. fodstøtter/66 cm/ 41-56 cm	0120-066-000
Eclipse ekskl. fodstøtter/72 cm/ 41-56 cm	0120-072-000
Eclipse ekskl. fodstøtter/82 cm/ 41-56 cm	0120-082-000
Eclipse ekskl. fodstøtter/92 cm/ 41-56 cm	0120-092-000
Eclipse ekskl. fodstøtter/102 cm/ 41-56 cm	0120-102-000
Eclipse ekskl. fodstøtter/112 cm/ 41-56 cm	0120-112-000
Tilbehør	0120-050-000
Bord universal, til sædebredde 55-72 cm	0100-999-001
IV holder (dropstativ)	0120-999-020
Nakkestøtte	0120-999-103
Monteringsbeslag	0180-999-009
Skivebremser	0120-999-022
Bælte til bruger	0120-999-062
Grow-kit Eclipse, 55 cm (22")	0120-999-602
Grow-kit Eclipse, 61 cm (24")	0120-999-604
Grow-kit Eclipse, 66 cm (26")	0120-999-606
Grow-kit Eclipse, 71 cm (28")	0120-999-608
Grow-kit Eclipse, 81 cm (32")	0120-999-612
Grow-kit Eclipse, 91 cm (36")	0120-999-616
Grow-kit Eclipse, 102 cm (40")	0120-999-620
Grow-kit Eclipse, 112 cm (44")	0120-999-622
Forstærkningssæt Eclipse 450 kg, 55 cm (22")	0120-999-624
Forstærkningssæt Eclipse 450 kg, 61 cm (24")	0120-999-626
Forstærkningssæt Eclipse 450 kg, 66 cm (26")	0120-999-628
Forstærkningssæt Eclipse 450 kg, 71 cm (28")	0120-999-630
Forstærkningssæt Eclipse 450 kg, 81 cm (32")	0120-999-634
Forstærkningssæt Eclipse 450 kg, 91 cm (36")	0120-999-636
Forstærkningssæt Eclipse 450 kg, 102 cm (40")	0120-999-640
Forstærkningssæt Eclipse 450 kg, 112 cm (44")	0120-999-642

Bestilling og tilbehør

Ryglænsforlængelse	0120-999-033
Armlæn forlænger, højre	0120-999-078
Armlæn forlænger, venstre	0120-999-077
Fodstøtte standard swing-away, højre	0120-999-008
Fodstøtte standard swing-away, venstre	0120-999-009
Fodstøtter elevérbar, højre	0120-999-006
Fodstøtter elevérbar, venstre	0120-999-007
Beslag til biltransport (Transit Tie-Down System)	0120-999-065
Standardryg, 55 cm	0120-999-255
Standardryg, 61 cm	0120-999-261
Standardryg, 66 cm	0120-999-266
Standardryg, 71 cm	0120-999-271
Standardryg, 81 cm	0120-999-281
Standardryg, 91 cm	0120-999-291
Standardryg, 102 cm	0120-999-2102
Stropryg med spænder, 55 cm	0120-999-155
Stropryg med spænder, 61 cm	0120-999-161
Stropryg med spænder, 66 cm	0120-999-166
Stropryg med spænder, 71 cm	0120-999-171
Stropryg med spænder, 81 cm	0120-999-181
Stropryg med spænder, 91 cm	0120-999-191



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com



FABRIKANT

PDG Mobility
PDG Product Design Group Inc.
#103-318 East Kent Avenue South,
Vancouver
BC V5X 4N6
Tel.: (604) 323-9220
Fax: (604) 323-9097
E-mail: info@pdgmobility.com
www.pdgmobility.com