



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUKTARK

Rollator Support

Stærk og funktionel rollator udviklet til den bariatriske bruger.

Rollator Support er beregnet til brugere, der vejer op til 200 kg.

Rollatoren kan bruges udendørs og indendørs på institutioner, plejecentre og i private hjem. Findes i to bredder.



- Passer til mange døråbninger
- Stærk konstruktion
- Fungerer også som hvilestol
- Vægtkapacitet op til 200 kg



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Rollatoren, der mindsker belastningen på håndled

Rollator Support anvendes af mobile brugere, der har fysik og kognitive evner til at styre, gå og bremse rollatoren på en sikker og forsvarlig måde.

De højdejusterbare underarmsstøtter hjælper brugeren til at gå i en oprejst stilling og sikrer aflastning på håndleddene.

Rollator Support findes i to bredder, 61 cm og 71 cm. Tallet refererer til afstanden mellem håndtagene.

Konstruktion

Rollator Support er udstyret med et stort polstret sæde, som gør det muligt at holde hvil undervejs.

Den meget stærke og holdbare konstruktion giver sammen med de massive hjul med stålgafler sikrer stor sikkerhed og støtte for brugeren.

Rollator Support har stabile bremses, som både kan låse som parkeringsbremse eller bruges som manuel bremse. De to former for bremses sikrer kontrol og sikker manøvrering.

Rengøring og vedligeholdelse

Rollatorens stel, sæde, håndtag, underarmsstøtter og sikkerhedsrygbøjle skal rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Desinfektion

Rollatorens stel, sæde, håndtag, underarmsstøtter og sikkerhedsrygbøjle kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Transport i bil

Rollator Support kan let klappes sammen, hvis den skal transporteres i motoriseret køretøj.

Hvis rollatoren skal fylde mindre, kan kurven og sikkerhedsrygbøjlen tages af.

Rollator King

Vores anden bariatriske Rollator (King) minder i sin konstruktion om Rollator Support.

Rollator King har dog håndtag i stedet for underarmsstøtter.



Vær opmærksom på, at modellen med en totalbredde på 84 cm kan have svært ved at komme igennem visse døråbninger.

Valg af model afhænger af brugers kropsform. Til brugere med meget fylde omkring bækken og lår anbefaler vi en størrelse 71 cm. Kontakt os på 7025 2522 for råd og vejledning inden bestilling.

Rollatoren er forsynet med kurv og reflekser i håndtagene.


Sikkerhedsbøjle

Når brugeren sætter sig på rollatoren, sikrer sikkerhedsrygbøjlen, at brugeren placeres på hvilesædet. På den måde undgås fald bagover, og brugeren føler sig tryk ved at sætte sig ned.

Bolte og møtrikker skal kontrolleres hver tredje måned.

Kontakt Cobi Rehab for yderligere vedligeholdelse af Rollator Support.

Hvilesæde og sikkerhedsrygbøjle kan ved behov skiftes ved overgang til ny bruger.

 Rollator Support må ikke bruges som sæde i motoriseret køretøj.

Hvis bruger i stedet har behov for en Rollator King, kan underarmsstøtterne afmonteres og erstattes af håndtag.

Kontakt Cobi Rehab for mere information om afmontering af underarmsstøtter.

Specifikationer, model 61 cm og 71 cm	
Brugervægt max.	200 kg
Total længde	850 mm
Total bredde	740/840 mm
Bredde mellem håndtag	610/710 mm
Højdejusterbar i 2,5 cm interval	100 - 130 mm
Sædebredde	510 mm
Sædedybde	370 mm
Åbning ind til sædet	610/710 mm
Sædehøjde	510 mm
Vægt	17 kg
Vægt i kurv maks.	5 kg
Sammenklappelig	Ja
Hvilesæde	Ja
Massive hjul	Ja
Ramme	Krom molybdæn stål/SAE41-30
Underarmsstøtter samt sæde- og rygpulster	Polyuretan
Hjul	8" massive
Forventet holdbarhed	7 år
ISO-klassifikation	ISO 12 06 06 - 11
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI	5740000100007N8
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	

Model	Siddebredde	Totalbredde	Varenummer	HMI
Rollator Support, 610 mm, inkl. kurv	610 mm	740 mm	0173-050-000	88145
Rollator Support, 710 mm, inkl. kurv	710 mm	840 mm	0173-071-000	127906
Håndtag, venstre			0170-999-010L	
Håndtag, højre			0170-999-010R	